


Stermant C.A

Fábrica y Mantenimiento de Esterilizadores
 CENTRO DE TURMERO, FINAL DE LA CALLE SALIAS QTA. LA MIEJE Nº 43-3
 TURMERO ESTADO ARAGUA.
 TELEFAX: 0244-663.60.27 CELULAR: 0416-641.95.35.
 info@stermant.com.ve
 www.stermant.com.ve
 RIF J-07584515-3 - NIT 0034197709

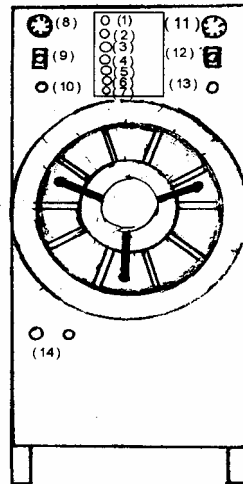

1. Encendido
2. En Proceso
3. Inyección de Gas
4. Esterilizando
5. Aireación
6. Aireación Manual
7. Fin del Proceso
8. Presión de Cámara
9. Inicio del Ciclo
10. Fin de Ciclo
11. Temperatura
12. Aireación Manual
13. Rompe Vacío
14. Calentamiento

Manual de Procedimiento STERMANT-VAC

1. Oprima el botón que indica **ENCENDIDO**, notará que el bombillo que dice **CALENTAMIENTO** se encenderá (parte inferior del equipo). ; este bombillo se encenderá y apagará cada 12 min. manteniendo la temperatura de la cámara en 40° centígrados. Simultáneamente se encenderá el bombillo que indica (puerta abierta-no operativa) neutralizando los botones pulsadores.
2. Introduzca el material a esterilizar y cierre la puerta herméticamente hasta llegar a su tope, el bombillo indicador (puerta cerrada-operativa) se encenderá.
3. Abra la llave de la bombona de gas.
4. Oprima el botón que dice **INICIO DE CICLO**, los bombillos de **EN PROCESO** e **INYECCIÓN DE GAS** se encenderán, el bombillo "en proceso" permanecerá encendido durante el tiempo de la esterilización y el bombillo "inyección de gas" se apagará cuando el manómetro **PSI. CAMARA** llegue a 12 lbs.Psi. y comenzará el proceso de esterilización, encendiéndose el bombillo de **ESTERILIZANDO**. Por razones de "seguridad" se recomienda cerrar la llave de la bombona una vez comience el proceso de "Esterilización". Este Proceso finaliza en 5 horas y luego empieza la **Aireación (1/2 hora)** inyectando vapor por 5 segundos para neutralizar el gas.
5. Finalizada la "aireación" se encenderá el bombillo que indica **FIN DEL PROCESO** y sonará la alarma. Presione el botón que indica **FIN DE CICLO**, nótese que el "manómetro de la cámara" tiene "presión negativa" y así le será difícil abrir la puerta, presione el botón que indica **ROMPE VACIO** hasta que la aguja del manómetro llegue a cero.; si el manómetro de la cámara termina en presión positiva, oprima el botón de aireación manual observando la aguja del manómetro, cuando este llegue a cero, presione el botón que indica fin de ciclo.
6. Abra la puerta y retire el "material esterilizado".
7. Si por razones extremas usted tiene que abortar el "proceso de esterilización", presione el botón de Fin del Proceso y luego **AIREACIÓN MANUAL**: los bombillos de aireación manual permanecerán encendidos durante este proceso. Si pretende continuar con otra esterilización, comience el Procedimiento desde el punto N° 1; de lo contrario apague el equipo.

www.stermant.com.ve